

사용 방법 이것을

## 배설물 혈색소 검사 키트

조심스럽게 의자 (지저분한 들어가기 전에) 샘플이 지침을 읽어보십시오.

전체의 IT의 따라야하는 단계의 중요 : 만약 당신이 감독이, 그것은 결과의 정확성에 영향을 미칠 수로 샘플을 채취할 수 없습니다. 만약 현재의 혈액 때까지 기다려 주시기 바랍니다 (붉은 반점) 확실한 직장 출혈이 발생하는 테스트를 완료 후 출혈을 중단했다.

하지하지 않으면이 시험을 제한하거나 다이어트 약품 또는 변경해야합니다.

1. 전개하고 상단에있는 화장실 변기의 물이 내부의 대형 컬렉션 휴지. 작은 흡수 패드를 사용하지 (마십시오 반신용 봉투에 포함 - 당신이 원가 다른 이유로 저장해야합니다.)

2. 그래서 똥을 누다운 의자 (배설물) 컬렉션 종이 상단에 빠진다.

3. 귀하의 대변 신문은 싱크 전에 (배설물)의 샘플을 채취한다. 여기 방법 :

- 열기를 부드럽게 비틀과 곧바로 뚜껑을 해제하여 제공된 샘플 병. 샘플 프로브의 녹색 모자를 첨부해야한다. 샘플 프로브의 팁을 grooved 녹색 귀하의 의자에서 샘플을 채취하는 데 사용됩니다.

- 모르 견본 용기에 액체를 비웁니다. 이 액체입니다 방부제와 실험실로 샘플을 처리하는 데 필요한.

- 다쳤고, 대변 (배설물의 표면)은 샘플을 조사했다. 완전히 의자와 함께 샘플 프로브의 grooved 부분을 커버해야합니다. 이것은 당신의 의자 () 샘플 지저분한입니다.

- 샘플 병 속으로 부드럽게 샘플 프로브와 모자를 삽입합니다. 모자에 밀어 넣기를 클릭하기 전까지는 곳으로 돌리는데. 다시 열지 마십시오. 일부 샘플 병의 경우 외부에, 우리에게 메일링 전에 샘플 병을 닦아주십시오 언었다.

4. 플러시 변기. (컬렉션 휴지 부패물 시스템에 해가되지 않습니다.)

5. 샘플 병에있는 레이블에 기입하십시오. 귀하의 이름, 나이 / birtdate 및 샘플 날짜 인쇄 공간에 모아졌다. 서클 귀하의 성별. 제발 명확하고 깔끔하게 인쇄할 수 있습니다.

6. 당신은 샘플 수집에 날짜를 포함해야합니다 실험실 주문 양식에 날짜 컬렉션 섹션.

7. 샘플 병 안에 작은 흡수 패드에 일어난 작은 플라스틱 바이오 - 해이 가방. 그런 다음 반환 봉투 안쪽에 비닐 봉지를 삽입합니다. 같은 봉투에 실험실 주문 양식을 놓습니다.

참고 : 귀하의 샘플 컬렉션 날짜없이 실험실 주문 양식을 처리할 수 없습니다.

봉투를 밀봉한. 3 일 이내에 수집이나 연구실로 복귀 후 즉시 메일이 봉투.

